

## 1. Общие сведения о носилках.

Носилки продольно-поперечно складные Самоспас (далее НППС) для перемещения больных или пострадавших ручным способом. Компактные в собранном виде, что облегчает доставку к месту назначения. Наличие двух фиксирующих ремней позволяет надежно закрепить транспортируемого и осуществлять его эвакуацию или перемещение в узких ограниченных помещениях и проходах.

## 2. Технические характеристики.

НППС работоспособны во всех климатических и географических зонах без ограничений, в условиях морского климата, при изменении окружающей температуры от -50 до +50 С.

1.	Габариты в сложенном виде в транспортировочном чехле, см	110x18x11
2.	Длина в рабочем состоянии, см	221
3.	Ширина в рабочем состоянии, см	53
4.	Высота в рабочем состоянии, см	15
5.	Масса, кг	5
6.	Грузоподъемность, кг	150

## 3. Комплект поставки.

1.	Носилки продольно-поперечные складные Самоспас	1 шт.
2.	Чехол транспортировочный	1 шт.
3.	Паспорт	1 шт.

## 4. Указание мер безопасности.

Перед использованием НППС прочтите инструкцию.

## 5. Эксплуатации и техническое обслуживание.

НППС эксплуатируются в соответствии с руководством по эксплуатации. НППС не требуют специального технического обслуживания.

## 6. Условия хранения и транспортировки.

Хранить изделие следует в чистом, сухом виде.

Запрещается хранить изделие совместно с агрессивными химическими веществами. НППС разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии защиты от механических воздействий, осадков и воздействия агрессивных сред.

## 7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации НППС составляет 1 год со дня ввода в эксплуатацию. Срок хранения НППС составляет 5 лет со дня продажи. Предприятие-изготовитель обязуется в

течение гарантийного срока заменять и ремонтировать вышедшие из строя носилки при условии соблюдения покупателем правил их эксплуатации и хранения. С рекламацией покупатель должен обращаться в торговую организацию или непосредственно к изготовителю по адресу: 125363 Москва, Походный проезд, д.14-304. Претензии принимаются при наличии паспорта с отметкой о дате продажи.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НППС

- Порядок применения.
  - Расстегнуть транспортировочный чехол и извлечь носилки.
  - Развернуть носилки и встречным перемещением горизонтальных распорок привести носилки в рабочее состояние.
  - Установить носилки на горизонтальную поверхность, при этом концы двух пар фиксирующих ремней должны быть откинuty в стороны.
  - Уложить пострадавшего на носилки и пристегнуть его двумя фиксирующими ремнями путем вщелкивания пряжек в замки.
  - Взявшись за резиновые ручки носилок, поднять и приступить к транспортировке. При переноске пострадавшего необходимо оберегать от толчков и ударов, способных ухудшить его физическое состояние.
  - После завершения переноски, опустить носилки на горизонтальную поверхность и освободить фиксирующие ремни. Извлечь пострадавшего из носилок.
- Правила эксплуатации и хранения.
  - Перед эксплуатацией носилок проведите осмотр ремней и швов на предмет отсутствия повреждений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование носилок с обнаруженными разрывами полотна, разлохмаченными стропами ремней и надорванными или потертыми швами.
  - Оберегайте носилки от воздействия прямых солнечных лучей при хранении.
  - Храните носилки сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов.
  - Оберегайте ленты и швы носилок от повреждений, не храните носилки вне транспортировочных чехлов.
  - Очистку носилок от грязи производят мыльной водой и ветошью с последующей тщательной просушкой.
  - Дезинфекцию носилок производят после очистки с помощью щетки, смоченной в 1-3 процентном растворе хлорамина.

Дата изготовления \_\_\_\_\_  
МП \_\_\_\_\_  
Отметка ОТК \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_

Производитель: ООО «САМОСПАС» | (495) 640-38-38 | [www.samospas.ru](http://www.samospas.ru)

**Помните, что несоблюдение правил хранения и эксплуатации потенциально опасно для жизни пострадавшего!**

**САМО  
СПАС**

## **ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ**

**Носилки продольно-поперечно складные НПС  
Самоспас  
Артикул: ss NPPS**

